

Instrukcja obsługi Hivox

Aparaty te są bardziej rozbudowaną wersją artificial larynx. Zbudowane są w oparciu o najwyższe technologie z wykorzystaniem układów mikroprocesorowych. Charakteryzują się prostotą obsługi i użytkowania.

Pełny zestaw składa się z:

1. proteza krtani Hivox,
2. ładowarki do akumulatora
3. akumulatora wodorkowo - niklowego o pojemności 260 mAh
4. sznurka do noszenia protezy krtani na szyi

W celu włączenia aparatu należy odkręcić pierścień, do którego dołączony jest sznurek do zawieszenia na szyi, włożyć akumulator plussem do środka, zakręcić pierścień, przycisnąć włącznik, przekręcając pierścień membrany uzyskać jak najwyższą głośność generowanego dźwięku.

Następnie przyłożyć aparat w okolice podbródka lub szyi tak aby membrana ściśle przylegała do skóry, a oś aparatu była skierowana do ust, wypowiadać pojedyncze słowa. W przypadku cichego głosu proszę poszukać innego punktu przyłożenia aparatu do podbródka lub szyi.

Aparat posiada dodatkowo regulację głośności i częstotliwości. Głośność reguluje się za pomocą dwóch pomarańczowych przycisków po prawej stronie aparatu, a częstotliwość za pomocą dwóch zielonych przycisków po lewej stronie.

Do wzmocnienia głosu można dodatkowo wykorzystać wzmacniacze głosu: Minivoice, Mobilvoice.

Ładowanie akumulatora


1. Proszę odkręcić pierścień ładowarki akumulatora.
2. Włożyć akumulator do otworu znakiem + do wnętrza ładowarki.
3. Zakręcić pierścień.
4. Włożyć wtyczkę zasilacza do gniazda sieciowego.
5. Czas ładowania wynosi 10 godzin.
6. Końcowy okres ładowania sygnalizuje zapalenie się diody czerwonej.
7. Dioda czerwona zaświeci się również w przypadku braku akumulatora w ładowarce włączeniu zasilacza wtyczkowego do gniazdka elektrycznego.

UWAGA!!! W przypadku włożenia akumulatora znakiem minus do wnętrza Ładowarki i podłączenia do ładowania, może zmniejszyć jego żywotność, a nawet całkowitą utratę właściwości użytkowych.

Akumulator nie podlega gwarancji, producent nie przewiduje stosowania zastępczych akumulatorów.



Aparat generuje falę wibroakustyczną, która po przedostaniu się do ust jest artykułowana podczas wypowiedzania kolejnych słów. Przedstawia to poniższy rysunek 1.

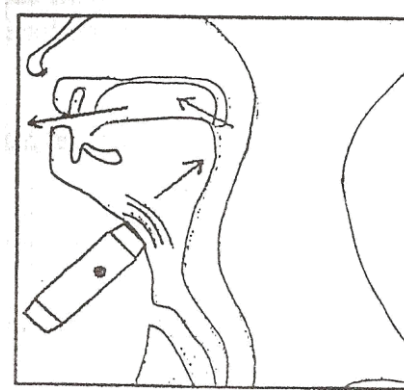

GŁOS UZYSKANY ZA POMOCĄ
 KRTANI ELEKTRONICZNEJ

Rys.1.

Membranę aparatu należy dokładnie przykładać całą powierzchnią w okolicę podbródka lub szyi lekko dociskając. Po szerokim otwarciu ust nacisnąć przycisk koloru czerwonego i przykładając aparat w okolicę podbródka i szyi znaleźć miejsce o największym poziomie głośności wydobywającego się z ust głosu. Następnie proszę bardzo dokładnie i powoli wypowiadać krótkie słowa starając się aby były głośne i zrozumiałe. Kolejnym etapem jest doskonalenie umiejętności mowy poprzez wypowiedzanie całych zdań.

ŚWIATOWE TOWARZYSTWO OSÓB LARYNGEKTOMOWANYCH prowadzi bezpłatną naukę mowy przełykowej, protezami krtani oraz kompleksową rehabilitację mowy.

Ul. Przysieki 4, 42-625 Ożarówice tel. 880 558 555
Ul. Szybowa 2a, 41-808 Zabrze

Dokładne zapoznanie się z instrukcją pozwoli uniknąć problemów podczas użytkowania aparatu i nie spowoduje jego uszkodzenia.

Dziękujemy Państwu, że zdecydowaliście się zakupić aparat naszej produkcji. Charakteryzuje się on dobrymi parametrami technicznymi, wysokim poziomem zrozumiałej mowy przy małym zużyciu akumulatorów.