

Instrukcja obsługi MicroVox

Aparaty te są najprostszą wersją krtani elektronicznej. Zbudowane są w oparciu o najnowocześniejsze technologie z wykorzystaniem układów mikroprocesorowych. Charakteryzują się prostotą obsługi i użytkowania.

Pełny zestaw składa się z:

1. protezy krtani MicroVox
2. ładowarki do akumulatora
3. akumulatora wodorkowo - niklowego o pojemności 260 mAh
4. smyczy do noszenia protezy krtani na szyi

W celu włączenia aparatu należy odkręcić pierścień, do którego dołączona jest smycz do zawieszenia na szyi, włożyć akumulator plussem do środka, zakręcić pierścień, przycisnąć włącznik, przekręcając pierścień membrany (o niewielki kąt zgodnie lub przeciwnie do wskazówek zegara) uzyskać jak najwyższą głośność generowanego dźwięku.

Następnie przyłożyć aparat w okolicy podbródka lub szyi tak, aby membrana ściśle przylegała do skóry, a oś aparatu była skierowana do ust, wypowiadać pojedyncze słowa. W przypadku cichego głosu proszę poszukać innego punktu przyłożenia aparatu do podbródka lub szyi.


Do wzmocnienia głosu można dodatkowo wykorzystać wzmacniacze głosu: Minivoice, Mobilvoice.

Ładowanie akumulatora:

1. Proszę podłączyć kabel zasilający do ładowarki
2. Włożyć akumulator do otworu znakiem + do wnętrza ładowarki.
3. Włożyć wtyczkę zasilacza do gniazda sieciowego.
4. Czas ładowania wynosi 10 godzin.
5. Końcowy okres ładowania sygnalizuje zapalenie się diody czerwonej.
6. Dioda czerwona zaświeci się również w przypadku braku akumulatora w ładowarce po włączeniu zasilacza wtyczkowego do gniazda elektrycznego.


UWAGA!!!

Włożenie akumulatora znakiem minus do wnętrza ładowarki i podłączenie do ładowania może zmniejszyć jego żywotność, a nawet całkowitą utratę właściwości użytkowych.

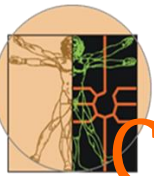

Akumulator nie podlega gwarancji, producent nie przewiduje stosowania zastępczych akumulatorów.

Aparat generuje falę wibroakustyczną, która po przedostaniu się do ust jest artykułowana podczas wypowiedzania kolejnych słów. Przedstawia rysunek 1.

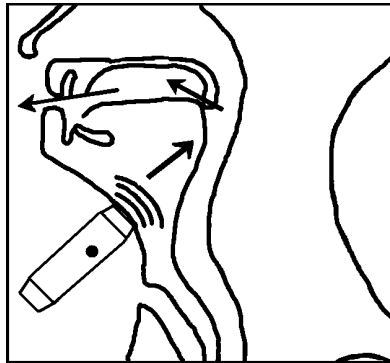

Rys.1.

GŁOS UZYSKANY ZA POMOCĄ
 KRTANI ELEKTRONICZNEJ

Membranę aparatu należy dokładnie przykładać całą po wierzchnią w okolice podbródka lub szyi lekko dociskając. Po szerokim otwarciu ust nacisnąć duży przycisk i przykładając aparat w okolice podbródka i szyi znaleźć miejsce o największym poziomie głośności wydobywającego się z ust głosu. Następnie proszę bardzo dokładnie i powoli wypowiadać krótkie słowa starając się, aby były głośne i zrozumiałe. Kolejnym etapem jest doskonalenie umiejętności mowy poprzez wypowiedzanie całych zdań.

ŚWIATOWE TOWARZYSTWO OSÓB LARYNGEKTOMOWANYCH
 prowadzi bezpłatną naukę mowy przełykowej, protezami krtani oraz kompleksową rehabilitację mowy.

Ul. Przysieki 4, 42-625 Ożarówice tel. 880 558 555
 Ul. Szybowa 2a, 41-808 Zabrze

Dokładne zapoznanie się z instrukcją pozwoli uniknąć problemów podczas użytkowania aparatu i nie spowoduje jego uszkodzenia.

Dziękujemy Państwu, że zdecydowaliście się zakupić aparat naszej produkcji. Charakteryzuje się on dobrymi parametrami technicznymi, wysokim poziomem zrozumiałej mowy przy małym zużyciu akumulatorów.

CyberBioMed LTD

Technika medyczna, Serwis, Produkcja, Sprzedaż,
 Realizacja projektów naukowo-badawczych